

4natur

Creating beautiful smiles, naturally




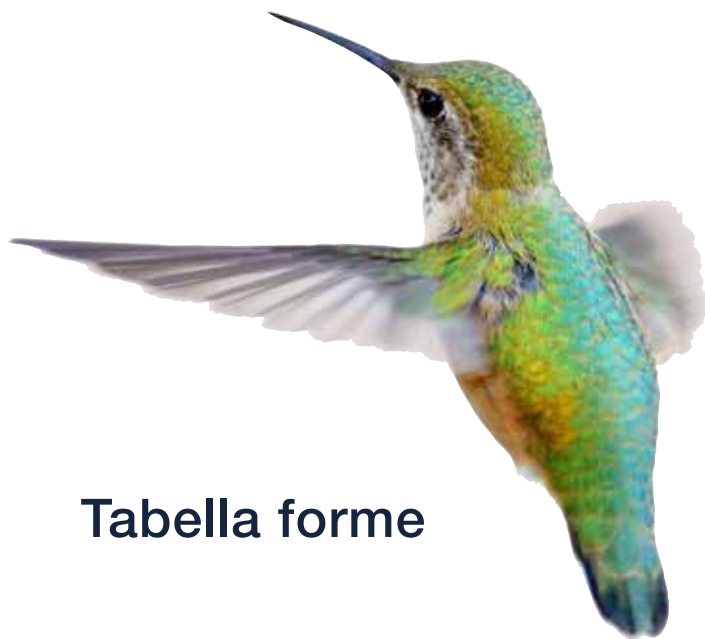


Tabella forme

schotlander

K

Denti Anteriori Superiori Forme Triangolari

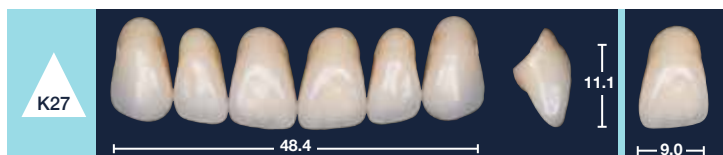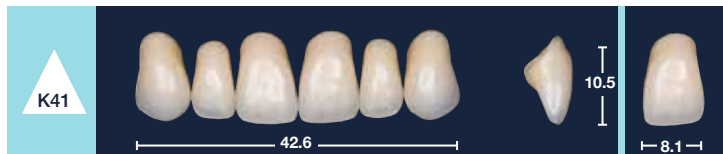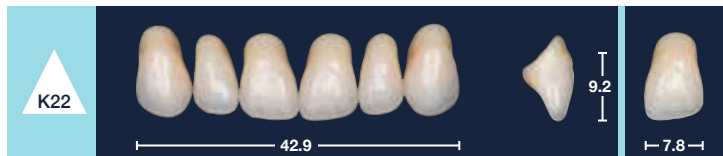

S

Denti Anteriori Superiori Forme Quadrate




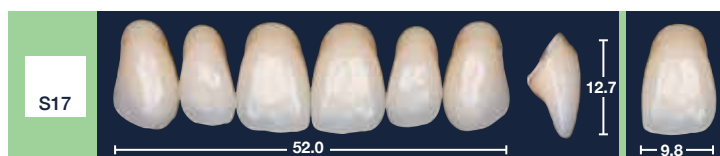




Tabella delle combinazioni

Denti Anteriori		Denti Posteriori
SUPERIORI	INFERIORI	
S11	L3/L5	P1/P3
S12	L5/L6	P1/P3
S13	L4/L5	P3/P5
S66	L5/L6	P3/P5
S14	L6/L7	P5
S15	L8/L9	P4
S17	L9	P6
S19	L9/L11	P4/P6
K22	L3/L4	P1/P3
K41	L3/L4	P3/P5
K24B	L4/L5	P3/P5
K25	L7/L8	P4/P5
K27	L8	P4
O33	L3/L5	P3
O36	L6/L7	P3
O39	L8	P3/P5




Disponibili su richiesta ulteriori informazioni
su come ottenere risultati ottimali.

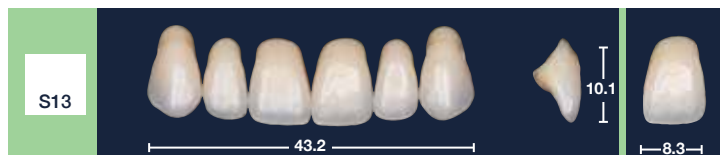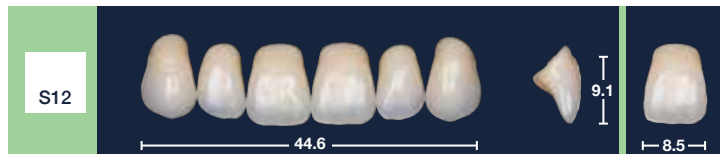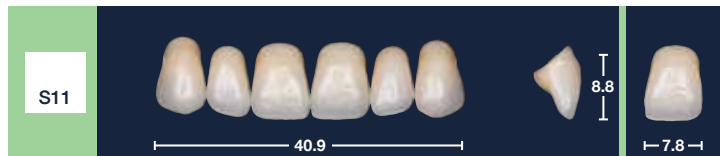

Denti Anteriori Superiori Forme Ovali

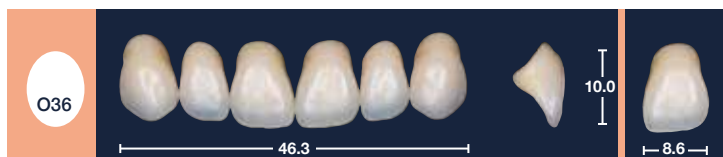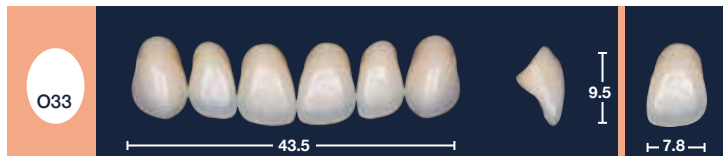






Denti Anteriori Inferiori

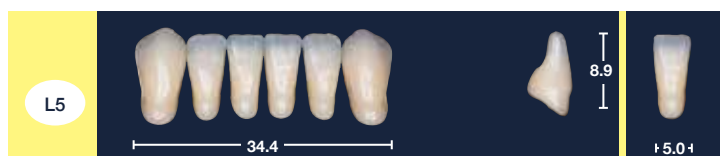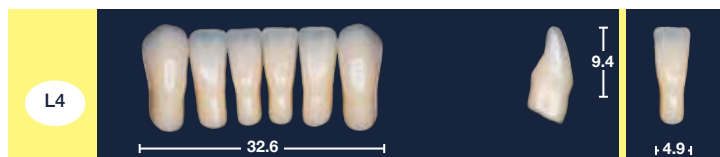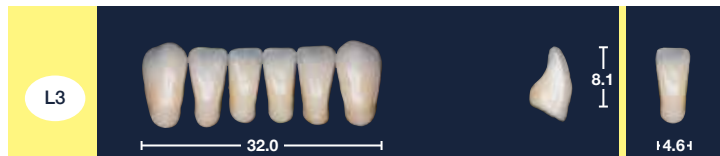

Le Forme Anteriori Inferiori 4natur

In molti pazienti gli anteriori inferiori sono visibili tanto quanto i denti superiori. Partendo da questa considerazione, gli anteriori inferiori **4natur** sono stati disegnati per sembrare denti naturali, impiegando la stessa cura per i dettagli e studio delle tonalità di colore dedicati ai superiori. Le 8 forme inferiori offrono un range completo di misure, dalle più piccole fino all'extra large L11. Quest'ultima è stata specialmente disegnata per i casi di protesi parziale, armonizzandosi con i denti restanti anche quando si verificano casi di recessione gengivale significativi.

Denti Posteriori

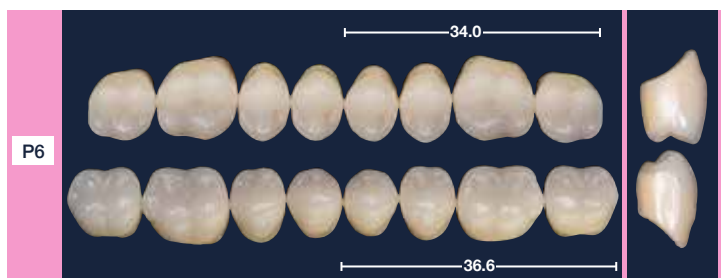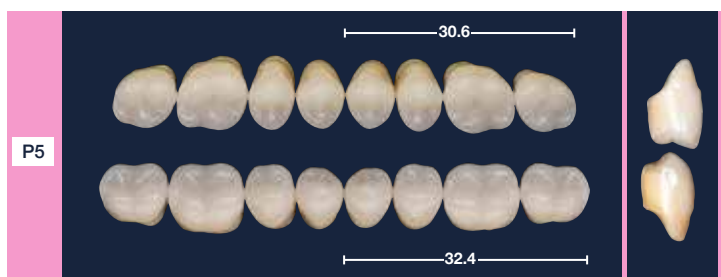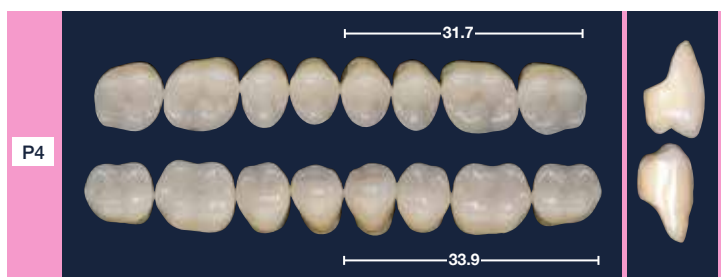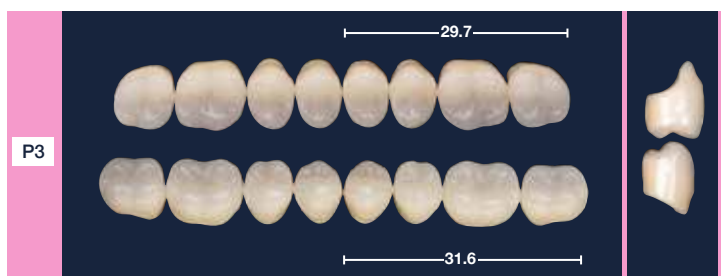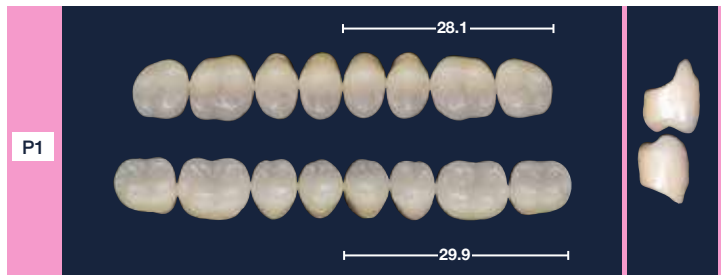

Le Forme Posteriori 4natur

Queste forme sono state disegnate per favorire un montaggio più facile e più veloce, grazie anche alla base dei denti già scavata per ridurre il tempo di lavorazione in laboratorio. L'angolazione delle cuspidi dei superiori è di 23° per favorire la masticazione, mentre quella degli inferiori è più piatta, per evitare interferenze nel cavo orale e velocizzare il lavoro sia in laboratorio sia in studio.

Grande attenzione è stata dedicata all'ottenere vitalità e un'apparenza naturale. Gli aspetti estetici sono stati migliorati allungando le facce vestibolari dei premolari in modo che il passaggio dai canini ai premolari sia più armonioso, evitando quindi quello sgradevole "scalino" che caratterizza altre linee di denti.

Molte delle forme posteriori inferiori sono vestibolo-lingualmente più strette per dare maggiore spazio alla lingua. Tutte le forme **4natur** si interdigitano facilmente, in occlusione sia bilanciata sia lingualizzata. Le forme dei posteriori **4natur** sono in grado di soddisfare tutto lo spettro delle esigenze cliniche, con 5 dimensioni dalla piccola P1 all'extralarge P6.

Forma	L6(mm)	Forma	L8(mm)
P1U	8.4	P1L	7.3
P3U	8.5	P3L	7.8
P4U	9.3	P4L	8.6
P5U	8.4	P5L	8.3
P6U	10.4	P6L	9.4

L6: è la dimensione massima della corona del primo molare sinistro - mascellare secondo lo standard ISO 22112.

L8: è la dimensione massima della corona del primo molare sinistro - mandibolare secondo lo standard ISO 22112.



Le tonalità 4natur

Il range **4natur** comprende 16 tonalità dalla A alla D, oltre alla tonalità bleach BL3. La scelta della tonalità andrebbe fatta con il paziente sotto luce naturale oppure a condizioni ben definite di luce artificiale (temperatura del colore: 5500°K). La scala colori **4natur** consente una scelta dei colori particolarmente accurata e affidabile, dal momento che è fabbricata con gli stessi materiali e sottoposta alla stessa stratificazione dei **4natur**.



Le Forme Anteriori Superiori 4natur

I denti **4natur** offrono incredibile vitalità grazie alla traslucenza incisale e alla naturale gradazione di colore all'interno del corpo del dente. Tutti i denti anteriori superiori **4natur** sono stati ridisegnati per seguire e riprodurre le forme e gli angoli delle linee presenti in natura. Il range delle forme **4natur** comprende quelle forme che nel tempo si sono dimostrate essere le preferite sia tra i pazienti sia tra gli utilizzatori, più 4 forme completamente nuove.

La forma S19 è di dimensione extra-large. È stata disegnata per quei casi di protesi parziale in cui, per riempire adeguatamente gli spazi lasciati dalla perdita del dente, si richiede una modellazione "su misura". Le 3 nuovissime forme O si caratterizzano per profili armoniosi, tondeggianti e delicati, che risaltano benissimo una volta inseriti nel cavo orale.



In figura:
forma S14

Altri vantaggi offerti da 4natur:

- Le forme anatomiche naturali e i margini crestali attentamente definiti offrono un'apparenza tridimensionale eccezionalmente naturale.
- Struttura interna a mammelloni sia nei centrali superiori sia in quelli inferiori, per garantire un aspetto ancora più naturale.
- Maggiore traslucenza incisale.
- I laterali sono più chiari dei centrali. I canini più scuri mesialmente, con grande traslucenza distale.
- Un sorriso è bellissimo quando è simmetrico rispetto alla linea centrale del volto. I denti **4natur** sono esattamente speculari rispetto a questa linea.
- Allo stesso modo dei denti naturali, i **4natur** mostrano opalescenza naturale e fluorescenza sotto i raggi UV, conservando così un aspetto naturale con tutti i tipi di luce.
- Eccellente adesione alla base protesica acrilica.
- Marchio CE, processo di produzione sotto lo Standard della Qualità ISO 9001 e secondo lo Standard per i Denti Artificiali EN ISO 22112.

Assistenza e corsi di formazione Schottlander

L'evoluzione dei materiali e delle tecniche ha modificato il settore dentale rendendolo sempre più esigente e tecnologicamente complesso, ma allo stesso tempo ha reso possibili grandi miglioramenti nel trattamento e nella cura del paziente. Crediamo nel valore della formazione continua come nell'esigenza di offrire un supporto tecnico soddisfacente ai nostri clienti. A questo proposito, Schottlander organizza corsi presso il Centro Corsi nello Hertfordshire e nel Regno Unito, come anche nel resto del mondo grazie al supporto della rete distributiva.

Per informazioni sui corsi organizzati in Italia si prega di scrivere a courses@schottlander.co.uk oppure contattare direttamente il distributore per l'Italia: info@yenco.it oppure **0438 842440**

Importatore esclusivo per l'Italia



Via Cal Bruna, 1/A - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842440
e-mail: info@yenco.it
www.yenco.it

4natur® è un marchio registrato di Davis Schottlander & Davis Ltd, UK.



Davis Schottlander & Davis Ltd

Fifth Avenue, Letchworth Garden City, Herts, SG6 2WD UK
Tel +44 (0)1462 480848 Fax +44 (0)1462 482802
Freephone 0800 97 000 79 Freefax 0800 97 000 78
e-mail: sales@schottlander.co.uk export@schottlander.co.uk
www.schottlander.com

Denti acrilici fabbricati all'interno dell'Unione Europea in conformità a EN ISO 22112:2017

Consigli di prudenza:


P261 – Evitare di respirare la polvere/
i fumi/i gas/la/nebbia/i vapori/gli aerosol.



! Non inalare
la polvere.



schottlander

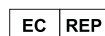

Schottlander (IRL) Limited.
Suite 11, Parklands Office
Park, Southern Cross Road,
Bray, Co Wicklow, Eire.